




Protocole de prélèvement – Frottis Cervico-Vaginal

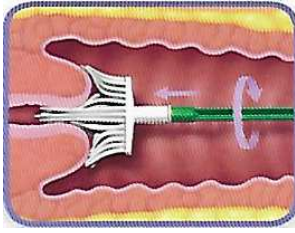

Obtenir un échantillon adéquat du col de l'utérus à l'aide de la brosse. Insérer les poils situés au centre de la brosse dans le canal endocervical suffisamment profondément pour que les poils les plus courts soient totalement en contact avec l'exocol. Pousser délicatement la brosse puis la faire **tourner 5 fois à 360°** dans le sens des aiguilles d'une montre.

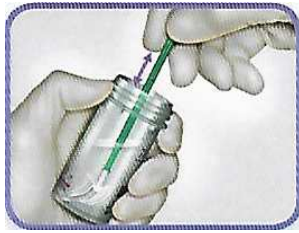

Rincer la brosse en l'introduisant **immédiatement** dans le flacon de solution et en la pressant 10 fois au fond du flacon de façon à séparer les poils. En dernier lieu, secouer **vigoureusement** la brosse pour libérer le matériel résiduel. Inspecter visuellement le dispositif pour vérifier qu'aucune matière n'est restée collée. Jeter le dispositif de prélèvement. **NE PAS LAISSER LA TÊTE DE LA BROSSSE DANS LE FLACON.**

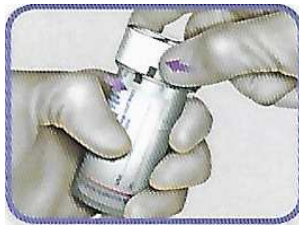

Visser le bouchon de sorte que son repère noir de vissage dépasse le repère noir du flacon. **Ne pas serrer trop fort.**



Identifier l'échantillon avec le nom de naissance (nom de jeune fille), prénom, nom d'usage (nom marital) et date de naissance.

Joindre cette fiche de suivi médical avec les renseignements cliniques complétés (indispensable).

Mettre le flacon et cette fiche de suivi médical dans le sachet de transport.

L'échantillon doit être acheminé au laboratoire dans les meilleurs délais après le prélèvement, jusqu'à 10 jours maximum, à température ambiante.